

Directrices de limpieza para los sistemas de NPWT WoundPro™ y WoundPro+™

En Pensar Medical, le damos prioridad a la seguridad y eficacia de nuestros sistemas de presión negativa (NPWT) para la terapia de heridas. Una limpieza adecuada es esencial para garantizar la longevidad y confiabilidad de su dispositivo. Siga estas pautas para limpiar su unidad de manera efectiva.



Utilice limpiadores desinfectantes cuaternarios a base de alcohol de grado hospitalario para obtener resultados óptimos.

01



Elija un área designada:

Realice la limpieza del equipo utilizado por el paciente en un área designada separada de los suministros limpios o esterilizados y de las zonas de preparación de alimentos.

02



Lávese bien las manos:

- + Lávese las manos minuciosamente y regularmente, especialmente después de quitarse los guantes.
- + Preste atención a limpiar alrededor y debajo de las uñas y entre los dedos.

03



Use equipo de seguridad:

- + Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos.

04



Desconecte todos:

- + Retire el recipiente, el tubo y cualquier vendaje conectado a la unidad.
- + Deseche estos componentes siguiendo la Política de eliminación de desechos biomédicos de su instalación.

05



Preparar desinfectante:

- + Prepare una solución detergente/desinfectante según las instrucciones del fabricante. **ADVERTENCIA:** No mezcle con otros germicidas o detergentes.
- + Use limpiadores desinfectantes cuaternarios a base de alcohol de grado hospitalario para mejores resultados.
- + Siga las instrucciones del fabricante para la máxima eficacia del desinfectante.

06



Limpie a fondo la unidad:

- + Aplique la solución limpiadora a base de alcohol sobre una toalla o un paño, luego limpie suavemente las superficies de la unidad.
- + Limpie minuciosamente todas las superficies de la unidad.
- + Evite utilizar un paño demasiado saturado.
- + ***ADVERTENCIA: Nunca rocíe soluciones de limpieza directamente sobre unidad.***

07



Permitir el período de secado y espera:

- + Seque completamente la unidad con un paño limpio.
- + Deje que la unidad se seque al aire durante al menos 30 minutos.

08



Deseche adecuadamente las sustancias corporales:

- + Deseche las sustancias corporales según la Política de desechos biomédicos.

09



Quitar el equipo de seguridad:

- + Quitese y deseche guantes, indumentaria protectora y protección para los ojos según los protocolos del centro.

ADVERTENCIA:

El contacto directo con fluidos corporales es potencialmente peligroso y puede resultar en enfermedad severa o muerte. Siempre observe las precauciones universales al manipular canisters, tubería o apósitos para los sistemas WoundPro y WoundPro+.

ADVERTENCIAS CRÍTICAS

- ⊗ No mezcle detergentes/desinfectantes con otros germicidas o detergentes.
- ⊗ No rocíe líquidos directamente sobre la unidad.
- ⊗ No caliente ni esterilice con vapor la unidad de control.
- ⊗ La pulverización con fuerza puede provocar la entrada y daños a los componentes internos, afectando la funcionalidad del dispositivo.



Seguridad de los apósitos y la contención de líquidos.

Los sistemas NPWT WoundPro y WoundPro+ están diseñados para contener fluidos corporales dentro de la tubería y el canister. Tome precauciones para que usted se proteja a la exposición de fluidos corporales y siga los protocolos de su institución para la limpieza de dispositivos médicos.

Es imprescindible consultar también las instrucciones incluidas con cada apósito. Revise el manual del usuario para obtener más información sobre los cambios de apósito.

Descargo de responsabilidad: este folleto tiene fines educativos únicamente y no sustituye el asesoramiento médico profesional ni las pautas específicas proporcionadas por su centro. Consulte siempre con su equipo de atención médica para obtener instrucciones y protocolos específicos para el paciente.

Contacta con nosotros

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la limpieza de sus sistemas WoundPro™ o WoundPro+™, consulte el manual del usuario o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. El bienestar de su paciente es nuestra prioridad y un mantenimiento adecuado garantiza un rendimiento y una seguridad óptimos.

Pensar Medical
Negative Pressure.
Positive Results.™

Pensar Medical, LLC
Tel: +1 (800) 669-4757
Email: hello@pensarmedical.com