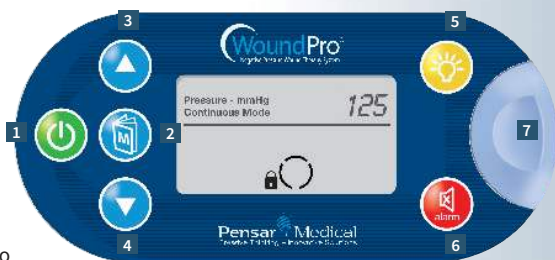


Tarjeta de referencia rápida

En esta Tarjeta de referencia rápida se proporcionan las pautas para el uso del sistema de tratamiento con presión negativa WoundPro[®] de Pensar Medical. Estas pautas NO reemplazan las instrucciones del médico del paciente.

Manejo de la unidad de control WoundPro

- Para encender la unidad, presione el botón **Power** (Encendido) **1**. La unidad entrará en modo **Stand By** (Espera).
- Para cambiar los ajustes, ingrese en el modo **Programming** (Programación) presionando y manteniendo presionado el botón **Power** (Encendido) y presionando luego el botón **Menu** (Menú) **2**.
- Parpadeará el modo **Continuous** (Continuo) o el modo **Intermittent** (Intermitente), según cuál haya sido el último tratamiento elegido antes de apagar la unidad.
 - ▶ Para cambiar entre modo **Continuous** (Continuo) e **Intermittent** (Intermitente), presione la tecla **flecha hacia arriba** o **hacia abajo**. Presione el botón **Menu** (Menú) para ingresar en el modo que desee usar.
 - ▶ Presione la **flecha hacia arriba** **3** y **hacia abajo** **4** para modificar la presión (en el modo intermittent [intermitente], presione el botón **Menu** [Menú] para cambiar entre los ajustes de **presión y tiempo**).
- Cuando alcance los ajustes deseados, presione el botón **Power** (Encendido) para salir del modo **Programming** (Programación; la unidad entrará entonces en modo **Stand By** [Espera]).
- Presione nuevamente el botón **Power** (Encendido) para comenzar el tratamiento.





- 1. Botón de encendido**
- 2. Botón de menú**
- 3. Botón “hacia arriba”**
- 4. Botón “hacia abajo”**
- 5. Luz del recipiente**
- 6. Botón de silencio de alarmas**
- 7. Botón de liberación del recipiente**

Cambios de recipiente

- Desconecte los tubos del recipiente de los tubos provenientes del vendaje de la herida.
 - ▶ Una los tubos entre sí en circuito cerrado para evitar cualquier derrame de líquido durante el procedimiento de cambio de recipiente
- Apriete el botón azul de liberación del recipiente **7**, que se encuentra en la parte superior de la unidad, mientras tira del recipiente para sacarlo de la unidad.
- Suelte el botón de liberación del recipiente y deslice el nuevo recipiente en la unidad. Debe oír un “click” para asegurarse de que la conexión esté firme.
- Conecte los tubos del nuevo recipiente a los tubos del vendaje de la herida y r inicie el tratamiento de la herida.


Bloqueo

- Para evitar que personal sin capacitación realice ajustes incorrectos, WoundPro entra automáticamente en modo **Lock Out** (Bloqueo) de tratamiento después de ser programado. Cuando el dispositivo está en modo Lock Out aparece un símbolo visible  en el panel de control
- Para desactivar el modo **Lock Out** (Bloqueo),  presione y mantenga presionado el botón **Power** (Encendido) y presione luego el botón **Menu** (Menú) para ingresar en el modo de programación.

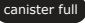
continúa al otro lado

Alarmas informativas

Las alarmas informativas no detienen inmediatamente el funcionamiento de la bomba, sino que permiten que el cuidador corrija la situación sin una interrupción indebida o prolongada del tratamiento deseado. En ambas situaciones la unidad seguirá funcionando normalmente durante un período limitado. Si la alarma no es atendida, una vez que pasa ese período la unidad dejará de funcionar, según cuál sea el problema.

Batería con carga baja: (3 pitidos por minuto) 

- Para corregir esta alarma, enchufe la unidad de control WoundPro en un tomacorriente para recargar la batería. La batería se recarga cuando la unidad se enchufa en un tomacorriente de pared.

Recipiente lleno: (3 pitidos por minuto) 

- Avisa al cuidador que el recipiente está casi lleno.
- Para corregir esta alarma, ponga en pausa la bomba y reemplace el recipiente.
- La unidad finalmente dejará de funcionar si el recipiente alcanza el estado de lleno.

Alarmas de advertencia

Estas alarmas avisan al cuidador acerca de una situación que requiera su atención inmediata. Son situaciones que afectan en forma directa la capacidad del sistema para proporcionar tratamiento.

El aumento de la frecuencia del sonido, en el caso de las alarma de advertencia, diferencia claramente estas situaciones de las situaciones que activan alarmas informativas.

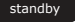
Bloqueo de la guía de aspiración: (3 pitidos cada 5 segundos) 

- Para solucionar esta situación de alarma, ponga en pausa la bomba y reemplace el recipiente y la tubería. Si la situación persiste después de reemplazar el recipiente, es posible que también se deban reemplazar el vendaje y su tubería.

Pérdida de vacío: (3 pitidos cada 5 segundos) 

- La unidad seguirá funcionando durante los primeros 30 minutos en que suene la alarma de pérdida de vacío. Si no se atiende la causa de la alarma en el transcurso de 30 minutos, la bomba se detendrá y la alarma seguirá sonando.
- Para corregir esta situación de alarma, compruebe que:
 - ▶ El recipiente esté conectado correctamente a la unidad de control.
 - ▶ El tuboLa tubería de extensión esté firmemente unidounida al recipiente.
 - ▶ El tuboLa tubería de drenaje esté firmemente unido al tubounida a la tubería de extensión.
 - ▶ El apósitovendaje ocluya la herida y el tubola tubería de drenaje.

Alarma de espera

Stand By (Espera): (pitido triple rápido el entrar o salir del modo de espera) 

- ▶ Si la unidad WoundPro queda en modo Stand By más de 30 minutos, sonará una alarma para avisar al usuario que corrija la situación. Para desactivar esta alarma, el usuario puede reiniciar el tratamiento o apagar la unidad si ya no se necesita más tratamiento.

Las alarmas de advertencia se deben atender lo más pronto posible. El tratamiento se interrumpe o se reduce mientras no se corrija la causa que activó la alarma. Si no puede corregir la causa que activó la alarma, comuníquese con el médico para recibir instrucciones. Si no logra comunicarse con el médico, comuníquese con una sala de emergencias para recibir asistencia.

Precauciones adicionales — Deben tomarse precauciones adicionales cuando se use WoundPro en pacientes que usan anticoagulantes o inhibidores de la agregación plaquetaria, pacientes con sangrado activo, pacientes con hemostasia de la herida, pacientes con antecedentes de irradiación de vasos sanguíneos, heridas que afectan a una fistula, heridas con trayectos fistulosos, heridas tunelizadas, o cuando WoundPro se use muy cerca de vasos sanguíneos u órganos.

Si no se obtienen y se siguen las instrucciones del médico tratante pueden producirse lesiones o la muerte.

Para conocer más instrucciones, descargue el Manual del usuario de WoundPro del sitio www.pensarmedical.com